

# Preberací protokol

## antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie

poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

**Odvzdávajúci:** Škola: .....

Trieda: .....

**Predmet odovzdania:** Antigénové samotesty na domáce použitie značky Siemens Healthineers

### Obsah balenia:

- 1 návod výrobcu na použitie pri samotestovaní
- 1 stručná referenčná príručka
- 5 kusov sterilných tampónov
- 5 testovacích jednotiek
- 5 extrakčných skúmaviek s pufrum a špičkami

### Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Antigénové samotesty distribuované koncom školského rok 2021/2022 sú určené na použitie v školskom roku 2022/2023. Testovanie sa bude realizovať podľa potreby v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19 podľa inštrukcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Každé vykonanie samotestu bude zákonny zástupca školy potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – buď prostredníctvom EDUPAGE, eŠkoly, e-mailu alebo smsky, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonny zástupca potvrdzuje škole vykonanie každého antigénového samotestu. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok samotestu, zákonny zástupca bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

Zákonny zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

- Antigénové samotesty sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
- V prípade, ak zákonny zástupca alebo plnoletý žiak antigénové samotesty nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
- V prípade, ak zákonny zástupca alebo plnoletý žiak antigénové samotesty použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

## Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

### Krok 1: Vloženie skúmavky do pracovnej stanice

Vložte skúmavku do pracovnej stanice dodanej so súpravou.

Pri súpravách obsahujúcich vopred naplnené odberové skúmavky: Z vrchnej časti skúmavky zložte fóliu.

Pri súpravách s fľaštičkami s tlmivým roztokom: Do skúmavky pridajte 10 kvapiek tlmivého roztoku.

### Krok 2: Odber vzorky z nosa

Použite dodávanú sterilnú výterovú tyčinku a opatrne si ju vložte do jednej nosnej dierky.

Špičku tyčinky zasuňte 2–4cm, kým nepocítite odpor. 5-krát otočte tyčinku v nosnej dierke.

Touto istou tyčinkou zopakujte proces v druhej nosnej dierke, pričom ju znova 5-krát otočte.

Vyberte tyčinku z nosnej dutiny a postupujte podľa pokynov na spracovanie vzorky.

### Krok 3: Otáčajte tyčinkou

Otočte tyčinku aspoň 6-krát vnútri skúmavky, pričom ju pritlačte o dno aj bočné steny skúmavky.

### Krok 4: Nechajte postáť a vložte špičku kvapkadla

Nechajte postáť jednu minútu a ešte niekoľkokrát pritlačte. Potom tyčinku bezpečne vyberte a zlikvidujte a špičku kvapkadla vložte do skúmavky so vzorkou.

### Krok 5: Pridajte vzorku na kazetu

Položte kazetu, označte ju a do nádržky pridajte 4 kvapky testovacej vzorky.

### Krok 6: Interpretácia výsledkov

Výsledky budú k dispozícii o 15 minút. Po 20 minútach výsledky už neinterpretujte.

Návod na použitie nájdete aj na webovej stránke výrobcu: <https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk>

Odovzdávajúci: Škola: .....

Trieda: .....

**Preberajúci:**

por. č.	meno a priezvisko preberajúceho	meno a priezvisko žiaka, pre ktorého sú testy určené	počet testov	dátum prevzatia	podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					